

Bij het opsturen van mestmonsters zijn er enkele aandachtspunten. Het is belangrijk dat de kwaliteit van het monster tijdens de postbezorging geborgd is. Daarnaast mogen mestmonsters alleen per post worden verzonden als dat wordt gedaan volgens de geldende wet- en regelgeving (UN3373/P650). Wanneer de monsters volgens de onderstaande instructies worden verpakt en verzonden, dan wordt daaraan voldaan en is het monster geschikt voor onderzoek als het binnenkomt in het laboratorium.

**1** Schrijf naam paard en datum monster op het etiket van de safetybag

Wanneer het etiket niet wordt ingevuld, bestaat het risico op verwisseling van monsters in het lab. Vul dit daarom altijd in.

**2** Neem 1 á 2 balletjes mest in het handschoentje en knoop dit dicht

De mest moet vers zijn (max 12 uur) en mag niet met ondergrond in aanraking zijn geweest. Als je het handschoentje niet fatsoenlijk dicht krijgt, zit er teveel mest in. Stuur geen natte mest in en zorg dat de laatste wormkuur minimaal 8 weken geleden is.

**3** Handschoen (met monster) gaat met absorptievel in safetybag

Het monster gaat in het handschoentje, dit knoop je vervolgens goed dicht. Daarna gaat het samen met het absorptievel in de safetybag. Als het monster met het absorptievel in aanraking komt droogt het uit en is het niet meer geschikt voor onderzoek

**4** Sluit de safetybag; verwijder de witte strook en druk de zak dicht

Verwijder alleen de witte beschermstrip aan de achterzijde van de blauwe plakrand en druk de safetybag dicht. Zorg dat de meeste lucht uit de safetybag is voor je deze dichtplakt.

**5** Plaats de safetybag met het monster tussen het kartonnen inlegvel

Het kartonnen inlegvel is verplicht. Plaats de safetybag met daarin het monster tussen het karton. Zo is het monster beschermd tegen lek raken tijdens de postbezorging. Wanneer het monster lekraakt is het niet meer geschikt voor onderzoek.

**6** Vul de vragenlijst op de achterkant in, ook als het paard al bekend is

Vul **altijd** de algemene informatie in, ook als het paard al bekend is bij ons. Deze gegevens zijn nodig om uitslagen te koppelen aan het juiste paard en zijn essentieel bij het interpreteren van resultaten, het verstrekken van passend advies en een betrouwbare uitslag.

**7** Doe monster en vragenlijst in de envelop en plak deze dicht (als alles klopt)

Doe de vragenlijst met het monster (tussen het kartonnen inlegvel) in de retourenvelop en plak deze dicht. Schrijf op de achterkant bij "Afzender" de gegevens van de afzender.

**8** Plak postzegels (indien nodig) en verstuur uiterlijk op woensdag de envelop

Plak voldoende postzegels (tenzij je de mestkit inclusief postzegel hebt besteld). Stuur mest alleen van maandag tot en met woensdag op met de post van die dag. Controleer op onze website eventuele gewijzigde openingstijden ivm feestdagen en/of vakanties.

In deze mestkit vind je alles wat je nodig hebt om één mestmonster te verpakken en verzenden voor onderzoek. Twijfel je of je het monster op de juiste wijze hebt verpakt of mist er iets in de mestkit? Ga dan naar onze website en bekijk de veelgestelde vragen (scan de QR code hiernaast). Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan vooral contact met ons op.

Standaard mestonderzoek is gericht op bloedworm, spoelworm, veulenworm, lintworm, zand en een QuickScan van de verteringsgraad. Lintworm scheidt onregelmatig eitjes uit, daarvoor is mestonderzoek is onvoldoende betrouwbaar. Voor leverbot, longworm en aarsworm is aanvullend onderzoek vereist. Denk je dat je paard niet gezond is? Neem dan **altijd** contact op met je eigen dierenarts.

Wil je meer weten, of heb je vragen over mestonderzoek, de verschillende parasieten bij paarden of over welke preventieve maatregelen je allemaal kunt nemen in de strijd tegen worminfecties? Bekijk dan de uitgebreide kennisbank op onze website. Scan de QR code hiernaast.

Met vriendelijke groet, Team Paard & Mestonderzoek



Veelgestelde vragen



Kennisbank