

INSTRUCTIES VOOR HET VERZAMELEN, VERPAKKEN EN VERSTUREN

Let op! Mestmonsters die niet correct zijn verpakt, worden niet onderzocht!

Bij het opsturen van mestmonsters zijn er enkele aandachtspunten. Het is belangrijk dat de kwaliteit van het monster tijdens de postbezorging geborgd is. Daarnaast mogen mestmonsters alleen per post worden verzonden als dat wordt gedaan volgens de geldige wet- en regelgeving (UN3373/P650). Wanneer de monsters volgens de onderstaande instructies worden verpakt en verzonden, dan wordt daaraan voldaan en is het monster geschikt voor onderzoek als het binnenkomt in het laboratorium.

1.



Schrijf de naam van je paard en datum van het mestmonster op het etiket van de safetybag.

Wanneer het etiket niet ingevuld wordt, bestaat er een risico op verwisseling van monsters in het lab. Vul dit dus altijd in.

2.



Neem 1 à 2 balletjes mest in de handschoen en knoop deze dicht.

De mest moet vers zijn (max. 12 uur) en mag niet met de ondergrond in aanraking zijn gekomen. Als je het handschoentje niet goed dicht krijgt zit er te veel mest in.

Stuur geen natte/te dunne mest in en zorg dat de laatste wormkuur minimaal 8 weken geleden is.

3.



Doe de handschoen (met mestmonster) en absorptievel in de safetybag.

Het mestmonster gaat in het handschoentje, deze knoop je goed dicht! Daarna gaat het mestmonster samen met het absorptievel in de safetybag. Als de mest met het absorptievel in aanraking komt droogt het uit en is het niet meer geschikt voor onderzoek.

4.



Verwijder de witte strook van de safetybag en sluit de safetybag goed af.

Verwijder alleen de witte beschermstrip aan de achterzijde van de blauwe plakrand. Druk vervolgens de safetybag goed dicht. Zorg dat de meeste lucht uit de safetybag is voor je deze dichtplakt.

5.



Plaats de safetybag met het monster tussen het kartonnen inlegvel.

Het kartonnen inlegvel is verplicht. Plaats de safetybag (met mestmonster) tussen het kartonnen inlegvel. Zo is het mestmonster beschermt tegen invloeden van buitenaf. Wanneer het monster lek raakt is het niet meer geschikt voor onderzoek.

6.



Vul de vragenlijst zorgvuldig in, ook als het paard al bekend is.

Vul altijd de algemene informatie in, ook als je paard al bekend is bij ons. De gegevens zijn namelijk nodig om uitslagen te koppelen aan het juiste paard en essentieel bij het interpreteren van resultaten, het verstrekken van advies en een betrouwbare uitslag.

7.



Doe het mestmonster en de vragenlijst in de envelop en plak deze goed dicht.

Doe de vragenlijst met de safetybag (tussen het kartonnen inlegvel) in de retourenvelop en plak deze dicht.

8.



Verstuur het mestmonster het liefst dezelfde dag nog.

Stuur de mest via de post naar ons toe, het liefst dezelfde dag nog. Controleer onze website voor eventuele gewijzigde openingstijden in verband met feestdagen en/of vakanties.

In deze mestkit vind je alles wat je nodig hebt om één mestonderzoek te verpakken en verzenden voor onderzoek. Twijfel je of je het monster op de juiste wijze verpakt, mist er iets in de mestkit of heb je vragen met betrekking tot de verschillende parasieten bij paarden? Ga dan naar onze website en bekijk de veelgestelde vragen en/of kennisbank. Is je vraag niet beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op!

Standaard mestonderzoek is gericht op bloedworm, spoelworm, veulenworm, lintworm, zand en een QuickScan van de verteringsgraad. Lintworm scheidt onregelmatig eitjes uit, daarvoor is mestonderzoek onvoldoende betrouwbaar. Voor leverbot, longworm en aarsmaden is aanvullend onderzoek vereist. Denk je dat je paard niet gezond is?

[Neem dan altijd eerst contact op met je paardendierenarts!](#)

Liefs, team Paard & Mestonderzoek