



INSTRUCTIES VERPAKKEN GROEPS-/STALPAKKETTEN

Let op! Mestmonsters die niet correct zijn verpakt, worden niet onderzocht!

Hartelijk dank voor je aanschaf van het groeps- / stalpakket en daarmee ook het vertrouwen in ons bedrijf. Om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het onderzoek te kunnen waarborgen, is het erg belangrijk dat de onderstaande instructies nauw opgevolgd zullen worden. Wanneer dit niet het geval is, bestaat er een risico dat mestmonsters niet meer geschikt zijn voor onderzoek. Paard & Mestonderzoek is niet verantwoordelijk voor enige (financiële) schade als gevolg daarvan.

In het pakket tref je de onderstaande onderdelen aan. Mist er iets? Neem dan eerst contact met ons op voordat u het pakket instuurt.

- Monsterbuisjes met dop
- Labels voor op het monsterbuisje
- Een (of meerdere) Safetybags met het bijbehorende absorptievel
- Een label om de doos dicht te plakken
- Handschoentjes
- De vragenlijst

Volg bij het verzamelen en het verpakken de volgende instructies op:

1. Trek een handschoentje aan (voor ieder monster één apart handschoentje) en vul het monsterbuisje tot 1 cm onder de rand met verse mest.
2. Doe de dop op het busje en draai deze goed dicht.
3. Schrijf de naam van het paard en de datum van het mestmonster op een label en plak deze op het busje (goed aandrukken!)
4. Doe alle monsterbuisjes in de Safetybag inclusief het absorptievel.
5. Haal de witte beschermlaag van de Safetybag, druk zoveel mogelijk lucht uit de Safetybag en plak hem goed dicht.
6. Vul de vragenlijst zorgvuldig en volledig in. Zorg dat alle paarden waarvoor een monster wordt ingestuurd ook op de vragenlijst vermeld zijn en vul voor ieder paard de gevraagde gegevens. Ook als deze al bij ons bekend zijn. Let hierbij op dat de namen overeenkomen met de naam die vermeld staat op het mestmonster. Indien je liever de vragenlijst digitaal wilt invullen, stuur dan een mail naar info@paardenmestonderzoek.com.
7. Doe de Safetybag(s) met mestmonsters en de ingevulde vragenlijst in het retourdoosje en plak daarop het bijgevoegde label om de doos dicht te plakken.
8. Lever het pakket in bij een PostNL punt.

Zorg dat de laatst toegediende wormkuur minimaal 8 weken geleden is, tenzij het gaat om het controleren van de effectiviteit van een toegediende wormkuur (2 weken na toediening). De gevraagde gegevens zijn nodig voor het interpreteren van uitslagen, het verstrekken van passend advies en het verwerken van de informatie in ons systeem. Zo kunnen de gegevens correct worden gekoppeld aan paard en eigenaar.

Pakketten zonder (volledig) correct ingevulde vragenlijsten worden niet in behandeling genomen. Voor ieder paard waarvan de gegevens ontbreken wordt er een toeslag gerekend van €3,- aan extra administratiekosten. De prijs van groepspakketten is erop gebaseerd dat deze in één keer (conform bovenstaande instructies) worden geretourneerd. Wanneer monsters zonder overleg niet in één keer worden geretourneerd rekenen wij een toeslag van €4,50 per mestmonster.

Neem bij vragen of onduidelijkheden altijd eerst contact met ons op telefonisch, via WhatsApp of per mail.

Liefs, team Paard & Mestonderzoek